

TESTRESULTATEN



Na ontvangst van het monster op het laboratorium ontvang je binnen een week de uitslag. Je ontvangt een sms met een persoonlijke link waarmee de testresultaten online kunt inzien en downloaden. Bij de testresultaten vind je ook een toelichting.

4

POSTYOURLAB

PostYourLab is een merknaam van Labonovum BV
Meer informatie: www.labonovum.nl

POSTYOURLAB

BELANGRIJKE INSTRUCTIE
LEES VOOR GEBRUIK!



DNA VERZAMELEN

INSTRUCTIE DNA VERZAMELEN

Stap 1: Open de buis en plaats deze rechtop in de doos.

Stap 2: Open de folie van de wattenstaaf.

Let op: raak het watje **niet** met je vingers aan.

Stap 3: Stop de wattenstaaf in de mond en haal deze op en neer 10x langs de binnenzijde van de linkerwang en 10x langs de binnenzijde van de rechterwang.



1

Stap 4: Stop de wattenstaaf in de buis en breek de steel af. De steel breekt bij de inkeping.



Stap 5: Draai de dop goed op de buis

Stap 6: Ga naar postyourlab.nl/registreren en klik op de afbeelding DNA verzamelen. Registreer de buis en volg de instructie om de buis op de juiste manier te verpakken. Let op: meld de buis altijd aan, zonder registratie kunnen we je monster niet in behandeling nemen.

2

Website alleen geschikt voor weergave op PC of tablet, **niet geschikt voor mobiel.**

VERZENDEN



De envelop met het DNA monster kan (kosteloos) per brievenbuspost verstuurd worden. Vanaf vrijdag 17.00 uur en in het weekend verstuur je de envelop voor een snelle verzending via een medische brievenbus. Zie overzicht locaties op de website van PostNL: medische brievenbus.

3